

Souprava pro detekci antigenu COVID-19

styl

Koloidní zlato

Sendvičová metoda s dvojitou protilátkou, vysoká míra přesnosti.
Snadné použití, bez dalších pomůcek.



Výsledek do **15** minut



Zkušební test by měl být použit do 1 hodiny po otevření.

Výpočet skutečné frekvence	PCR
Specifita	100%
Sensitivita	92,31%
Přesnost	97,44%

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR, Čj.: MZDR 8148/2021-2/OLZP ze dne 1.3.2021 byla pro test udělena výjimka pro použití laickou osobou - k samotestování.

Způsob odběru: z dutiny ústní nebo z nosu.

Logistika

Skladovací podmínky	4°C-30°C
Balení	v kartonu 25 kusů setů
Trvanlivost	24 měsíců
Obsah balení (testovací set)	testovací karta, zkumavka s roztokem(extrakční pufr), tampon a návod k použití


Na výrobek se vztahuje výjimka Ministerstva financí ČR z 16.12.2020, kterou je u těchto typů zdravotnických prostředků prominuto DPH.

Proces postupu a interpretace výsledků


1

Orální výtěr: Stěr proveďte na zadní stěně hltanu nebo na obou stranách mandlí; nedotýkejte se jazyka

Odběr výtěru z nosu: Jemně otočte a zatlačte do nosní dutiny, třikrát zatlačte na nosní stěnu a poté vyjměte

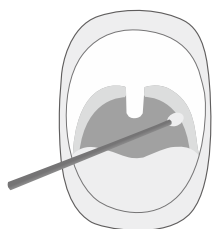

nebo

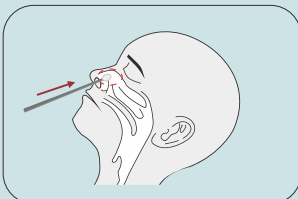


Odběr nosním tamponem:

Jemně točte a zatlačte do nosní dutiny, třikrát zatlačte tamponem na nosní stěnu a poté vyjměte.


2

Vložte tampon do extrakčního pufru. Tampón promíchejte více než 5krát a stlačte jej, aby vzorek vytekl. Vyjměte tampón a utáhněte víčko.

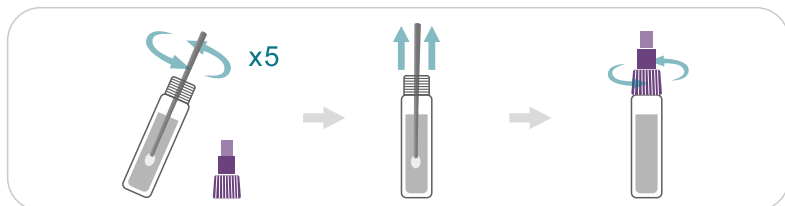


3

Otevřete fóliové pouzdro, vyjměte testovací kartu a označte ji.

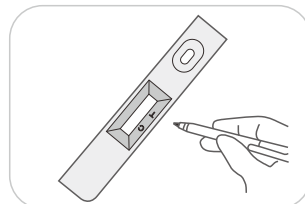


4

Přidejte 60 µl (asi 2 kapky) z extrahovaného vzorku do jamky na vzorek.

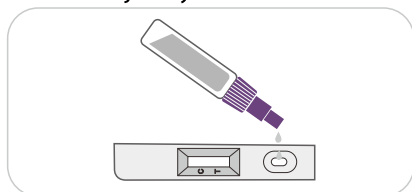


5

Interpretujte výsledky během 10-15 minut

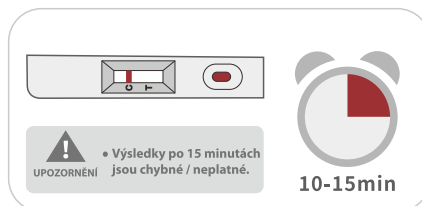

Interpretace výsledků

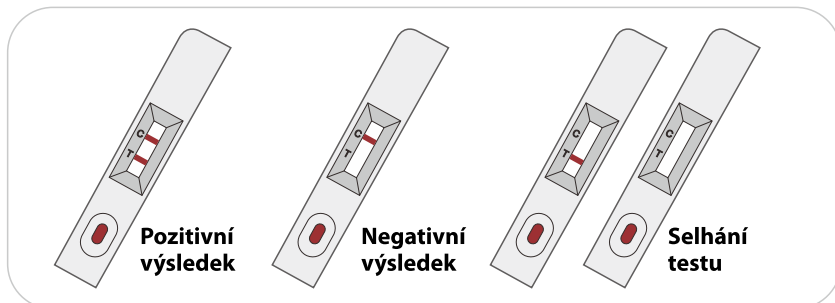

styl

Styl, družstvo pro chemickou výrobu, Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1
kontakt: objednavky@stylvd.cz, IČO: 00028134